

OPKLAPBAAR DOUCHEZITJE

WANNEER


Alleen bij goede dragende muren. Niet gebruiken bij holle of zachte wanden. Er bestaan zitjes met uitklappootjes.



PLAATSEN

- › Hoogte opklapbaar zitje: vergelijk met zithoogte van stoel of (verhoogd) toilet waarvan het makkelijk opstaan is.
- › Controleren op leidingen.
- › Bij tegels: tik de tegel licht in om de boor goed te kunnen plaatsen. Een speciale tegelboor is handig.
- › Pluggen niet laten uitsteken.
- › Zitje vastschroeven en goed testen en druk uitoefenen. Als het niet teveel gevraagd is bewoner ook laten testen.
- › Schoonmaken (een bewoner krijgt soms maar eenmaal per week schoonmaakhulp).

DOUCHEZITJE MET POOTJES

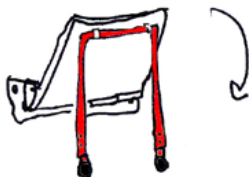

MATERIAAL

Opklapbare toiletsteunen of douchezitjes kunnen nieuw best prijzig zijn, maar zijn ook tweedehands redelijk verkrijgbaar. Keilbouten of houtdraadbouten (minimaal M6 x 50) en bijbehorende pluggen.

GEREEDSCHAP

- › hamer
- › rolmaat
- › stift
- › kraspen
- › leidingzoeker
- › accuboer
- › klop/hamerboor
- › haspel
- › tegelboor
- › steenboor



'LOSSE' DOUCHESTOEL

WANNEER

Bij zachte of holle muren, of in tijdelijke situaties kan een losse douchestoel of -kruk, al dan niet op wieltjes, een betere oplossing zijn.

DOUCHESTOEL



DOUCHEKUKJE



WAAR VERKRIJGBAAR

Bouwmarkt en thuiszorgwinkel.

Op Marktplaats worden soms tweedehands douchezitjes aangeboden.